

Instrucciones de uso

Lea detenidamente las instrucciones antes de usar. Guarde las instrucciones de uso, puede que necesite leerlas de nuevo.

EndWarts

FREEZE

ELIMINA EFICAZMENTE LAS VERRUGAS

1. INTRODUCCIÓN

EndWarts FREEZE es un tratamiento rápido de uso en casa que elimina eficazmente las verrugas de manos, brazos y pies. Es el primer tratamiento de uso en casa con óxido nítrico, un gas muy frío. A través de la Ultra Freeze Technology™ (Tecnología Ultra Congelante) se congela la verruga a -80°C y llega a la capa más profunda de la verruga.

EndWarts FREEZE comienza a una temperatura muy baja (-80°C) que se mantiene durante la aplicación. EndWarts FREEZE es, con diferencia, el tratamiento por congelación más frío de uso en casa. Esto se ha visto con un test de temperatura in-vitro en el que se incluyeron varios dispositivos de crioterapia de uso en casa. Por tanto, EndWarts FREEZE es el más eficaz.

EndWarts FREEZE es un dispositivo de alta tecnología que es rápido y fácil de usar. El tratamiento es apto para adultos y niños de más de 4 años de edad.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

No use EndWarts FREEZE

- en niños menores de 4 años de edad
- en la cara, ingle, genitales, cuero cabelludo o mucosas
- en piel sana (piel sin verrugas)
- en verrugas situadas en piel sensible y tenga especialmente cuidado cuando trate áreas de piel fina (por ejemplo, alrededor de las articulaciones)
- si la verruga y/o la piel de alrededor está sangrando o abierta, irritada, infectada, pica o se enrojece
- si no está seguro de si el engrosamiento es una verruga normal, consulte a su médico antes de usar
- sobre lunares, callos, ampollas, otros defectos de la piel o cualquier lesión que pueda ser cáncer de piel (melanoma)
- en vesículas de la piel llenas de líquido (denominado "molluscum contagiosum") o en cualquier otra vesícula o ampolla
- si está embarazada o es madre lactante
- si es diabético o una persona con problemas circulatorios o de coagulación sanguínea
- en múltiples verrugas al mismo tiempo, si están situadas muy próximas entre ellas. Espere 14 días antes de tratar la siguiente verruga.

Precauciones de seguridad

- No inhalar. Solo para uso externo. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
- No lo aplique durante más de 15 segundos en manos y brazos, o 40 segundos en pies. Una aplicación excesiva o incorrecta puede causar dolor y daño en la piel o en los nervios.
- EndWarts FREEZE debería ser usado por un adulto cuando se traten verrugas en niños.
- El óxido nítrico es un gas no tóxico y no inflamable, pero contribuirá a la combustión en caso de incendio. Manténgase alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. No fume o lo utilice cerca de una llama descubierta.
- Envase a presión. Puede explotar si se calienta. No perforo ni queme el cartucho incluso después de su uso** - el dispositivo está a alta presión y no se puede abrir.

Para mejores resultados en verrugas de los pies (pápiloma plantar)

Las durezas en la parte superior de la verruga hacen la congelación más difícil. Para mejores resultados en verrugas de los pies:



- Sumerja el área afectada en agua tibia hasta que la piel esté suave.
- Retire suavemente cualquier piel superpuesta en las verrugas del pie (pápiloma plantar) que crecen hacia adentro utilizando, por ejemplo, una lima de pies.
- Asegúrese de que las verrugas y la piel de alrededor están completamente secas antes del tratamiento.

- No lime la verruga; ésta puede ablandarse y formar una nueva superficie dura.

Después de usar EndWarts FREEZE

El uso de EndWarts Freeze puede causar sensación de hormigueo y puede sentir dolor o irritación. Estos efectos deberían desaparecer tras unas pocas horas. Inmediatamente después del tratamiento, la zona tratada se volverá blanca. Al poco tiempo la piel volverá a su color normal y la verruga se volverá roja.

A los pocos minutos o varios días después de la congelación, puede generarse una ampolla, ocasionalmente llena de sangre. Esto es un resultado normal del proceso de congelación y normalmente indica que el tratamiento ha sido satisfactorio. No intente explotar la ampolla. Si fuera necesario, protéjala con una venda estéril, o si la ampolla se ha abierto, desinfectela apropiadamente.

La verruga tratada desaparecerá lentamente después de 10 a 14 días. Sin embargo, la completa recuperación de la piel puede tardar más tiempo.

Si la verruga está situada en la planta del pie puede ser doloroso andar sobre ella. Para hacerlo menos doloroso, utilice una tirita redonda para callos en la zona.

- ¡No toque la zona afectada o intente arrancar la verruga!
- Mantenga la zona tratada limpia y desinfectada si fuera necesario.
- Se puede bañar o duchar inmediatamente después del tratamiento.

¿Necesito repetir el tratamiento?

EndWarts FREEZE es muy eficaz, se alcanzará rápidamente y se destruirá el centro de la verruga debido a la baja temperatura. Normalmente, con un solo tratamiento es suficiente. Verrugas persistentes o grandes pueden necesitar más de un tratamiento, especialmente si están en las plantas de los pies.

La verruga desaparecerá lentamente entre 10 y 14 días. Si la verruga, o parte de ella, no desaparece en 14 días necesita repetir el tratamiento y los pasos 1, 2 y 3. (Ver apartado 6: CÓMO USAR ENDWARTS FREEZE).

Si la verruga no desaparece después de 3 tratamientos, consulte a su médico.

Consulte a su médico:

- si usted o su niño experimenta algún efecto adverso inesperado
- si la verruga no se cura
- si la verruga no ha desaparecido después de 3 tratamientos.

3. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Posibles efectos adversos incluyen


- Ampollas (posibles ampollas con sangre) alrededor de la zona tratada, las cuales varían de un caso a otro. (Ver apartado 2: Después de usar EndWarts FREEZE).
- Pérdida del color de la piel, denominado "despigmentación".
- Quemaduras menores y formación de cicatrices.
- Riesgo de daño en la piel o en los nervios (en caso de sobreexposición).
- Sensación molesta transitoria (sensación de hormigueo o pinchazos).

4. CÓMO CONSERVAR ENDWARTS FREEZE

Antes del primer uso

- Consérvelo en un lugar seco y fresco (entre 5 - 25 °C). Protéjalo de la luz solar.
- No lo conserve en el congelador.
- No lo exponga a temperaturas por encima de 50 °C. No lo conserve en coches, caravanas, u otros lugares que puedan calentarse. Un aumento en la temperatura dañará el dispositivo y lo inutilizará de forma permanente.

Después de cada uso

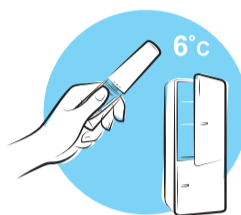

- Ponga la tapa y **consérvelo en el frigorífico** - esto aumentará la vida útil de EndWarts FREEZE y aumentará el número de dosis útiles.
- No lo conserve en el congelador.
- No exponga el dispositivo activado a una temperatura superior a 35 °C, ya que esto activará una medida de seguridad que inhabilita el dispositivo de forma permanente.
- Espere dos minutos después de su uso, retire la punta desechable e inserte una nueva punta. EndWarts FREEZE está ya preparado para el siguiente uso.
- Si limpia las partes de plástico del dispositivo, utilice únicamente un paño húmedo.

5. OTRA INFORMACIÓN

Envase y fecha de caducidad

- Un envase incluye un dispositivo de EndWarts FREEZE (7,5g de óxido nítrico líquido), un juego de 6 puntas desechables y unas instrucciones de uso.
- Cargándolo 2 segundos por aplicación, el número total de tratamientos es 7.
- Caducidad en la nevera tras ser activado: 2 meses.
- No use el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Deseche el producto vacío siguiendo la normativa vigente de eliminación de residuos urbanos.

Qué hacer si el dispositivo está vacío o roto:

- Si no ve escarcha o vapor después de una correcta activación y carga del dispositivo (Ver apartado 6: CÓMO USAR ENDWARTS FREEZE) se ha quedado sin gas, utilice un nuevo EndWarts FREEZE.
- Si escucha un silbido continuo después de haber activado el producto y todo el gas se ha acabado, el dispositivo está roto. No intente abrirlo o repararlo, incluso si piensa que está vacío. Devuelva el producto a su farmacia.


6. CÓMO USAR ENDWARTS FREEZE

¡ ANTES DE EMPEZAR EL TRATAMIENTO LEA LOS PASOS !

ACTIVAR

Solamente antes del primer uso

EndWarts FREEZE necesita ser activado una vez. No quite la tapa todavía.

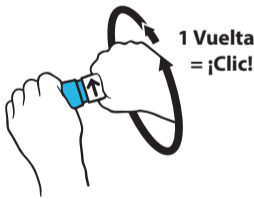

Gire la **parte blanca** del dispositivo mínimo **una vuelta completa** en la **dirección de la flecha** hasta que **oiga un fuerte clic**. Se necesita algo de fuerza. Puede oír antes unos suaves clicks.

Después de haber activado el dispositivo correctamente, nunca repita este paso.

1

CARGAR

Antes de cada tratamiento EndWarts FREEZE necesita ser cargado con gas frío.



Coloque **EndWarts FREEZE en vertical** encima de una mesa con la tapa transparente hacia abajo. Sostenga el dispositivo firmemente. Con la otra mano, **presione** la parte blanca del dispositivo **hacia abajo** durante **exactamente 2 segundos**.

Si presiona durante más tiempo desperdiciará dosis útiles. Presionar durante menos tiempo, reduce el efecto criogénico.

2

COMPROBAR



Quite la tapa transparente y **juse el producto inmediatamente!**

Compruebe que ve **vapor frío**. Si no hay vapor, repita el paso 1.

3

TRATAR




Presione la punta firmemente contra la verruga. Es esencial controlar el tiempo para garantizar mejores resultados.

- 15 segundos** en manos, dedos y brazos
- 40 segundos** en pies

Ponga la tapa de nuevo. ¡LISTO!

Después de su uso, conservar en la nevera.

6 °C

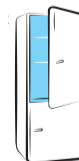

La verruga desaparecerá lentamente entre 10 y 14 días. Si la verruga, o parte de ella, no desaparece en 14 días repita los pasos 1, 2 y 3.